

Kontakta din EXOGEN-produktspecialist för att beställa gipsningsseter

Installation i gipsförbandet med fyrkantig dyna



- Lokalisera frakturstället med röntgen
- Markera behandlingsområdet på gipsförbandet med ett X



- Använd en gipssåg av standardtyp
- Skär ut en öppning i gipsförbandet



- Avlägsna den utsågade biten från öppningen
- Avlägsna överskott på polstringsmaterial och klipp det elastiska tubbandaget med sax



- Avlägsna lager från den fyrkantiga filt dynan tills dynan har samma tjocklek som gipsförbandet
- Använd endast fyrkantig dyna när du skär ut ett fyrkantigt hål



- För in fästeanordningen i nätet tills nätet sitter över den undre kragen
- Dra av skyddspappret från den gråa fyrkantiga dynan och fäst den vid botten på fästeanordningen



- För in enheten i den fyrkantiga öppningen
- Sätt det röda locket på fästeanordningen



- Avsluta gipsningen så att gipsbindan täcker nätet runt fästeanordningen



- Slutförd inbyggnad i gipset



- Installera filtpluggen för att förhindra ödem i öppningen



- Sätt på locket på fästeanordningen

Inbyggd i gipsförbandet



- Markera behandlingsområdet och dra på tubbandaget
- Klipp ett hål i tubbandaget över behandlingsstället, och se till att det markerade området är öppet mot huden



- Dra av skyddspappret från den gråa fyrkantiga dynan och fäst den vid botten på fästeanordningen
- Infoga denna enhet i tubbandaget



- Illustration av korrekt placering under polstring



- För in den runda filtpluggen för att hålla fästeanordningen på plats



- Applicera filtmaterial på gipsförbandet – dela eller klipp ett hål som passar över fästeanordningen
- Applicera resten av gipspolstringen. Passa in fästeanordningen i hålet så hålls den på plats medan gipsningen avslutas.



- Applicera ett lager med syntetiskt gipsmaterial
- Placera nätfyrkanten på plastporten för att säkerställa en solid konstruktion




- Sätt det röda locket på fästeanordningen
- Avsluta gipsningen så att gipsbindan täcker nätet runt fästeanordningen



- Sätt på locket på fästeanordningen

Tillbehörssats för gipsning

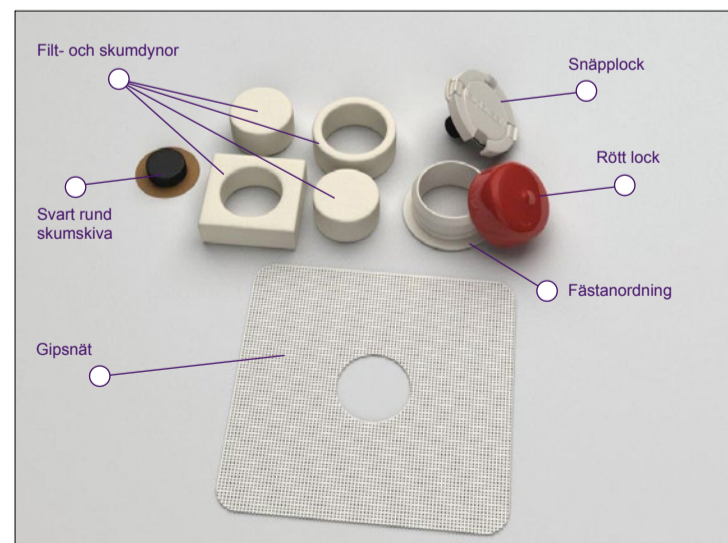

Installation i gipsförband



- Placera fästeanordningen i remmen så att den sitter säkert över öppningen i gipset



- Placera den runda filtpluggen i fästeanordningen

*Summering av användningsområde

EXOGEN indiceras för icke-invasiv behandling av bendefekter (förutom ryggrad och skalle), som omfattar behandling av försenad läkning, utebliven frakturläkning¹, stressfrakturer och ledfusion. EXOGEN indiceras även för påskyndning av läkningstiden för färsk fraktur, reparation efter osteotomi, reparation i bentransportgrepp och reparation i osteodistraktionsgrepp.

¹ En utebliven frakturläkning anses etablerad när frakturstället inte visar några synliga tecken på läkning.

Det finns inga kända kontraindikationer för EXOGEN-anordningen. Säkerhet och effektivitet har inte fastställts för individer vars skelett är omoget, gravida eller ammande kvinnor, patienter med hjärtpacemaker, frakturer från bencancer eller patienter med dålig blodcirkulation eller koagulationsproblem. En del patienter kan vara känsliga för ultraljudsgelen. Fullständig ordinationsinformation finns på www.exogen.com. Du kan även ringa kundtjänst på 020-79 77 55.